

## Sicherheitshinweise:

Da der AF-Stepper nur ein Zusatzmodul ist, muss auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung des Rollators beachtet werden.

Außerdem ist es empfehlenswert, die Handhabung der Paddel mit einem Therapeuten oder Verwandten zu üben.

Dieses Modul ist nur für den Troja Rollator der Firma Topro konstruiert und darf somit nur an diesen montiert werden.

**C.Beuthel** 



**Erich-Hoepner-Ring 1 · 42369 Wuppertal**

Tel.: 0202 / 4 30 46-800 · Fax: 0202 / 4 30 46-899

E-Mail: [info@beuthel.de](mailto:info@beuthel.de) · Internet: [www.beuthel.de](http://www.beuthel.de)

**C.Beuthel**  
Das Sanitätshaus




Unser Lächeln hilft

## Informationen und Bedienhinweise

# AF-Stepper

Eine Hilfe für Parkinson-Patienten und  
Trainingsmodul zur Verbesserung des Gangbilds

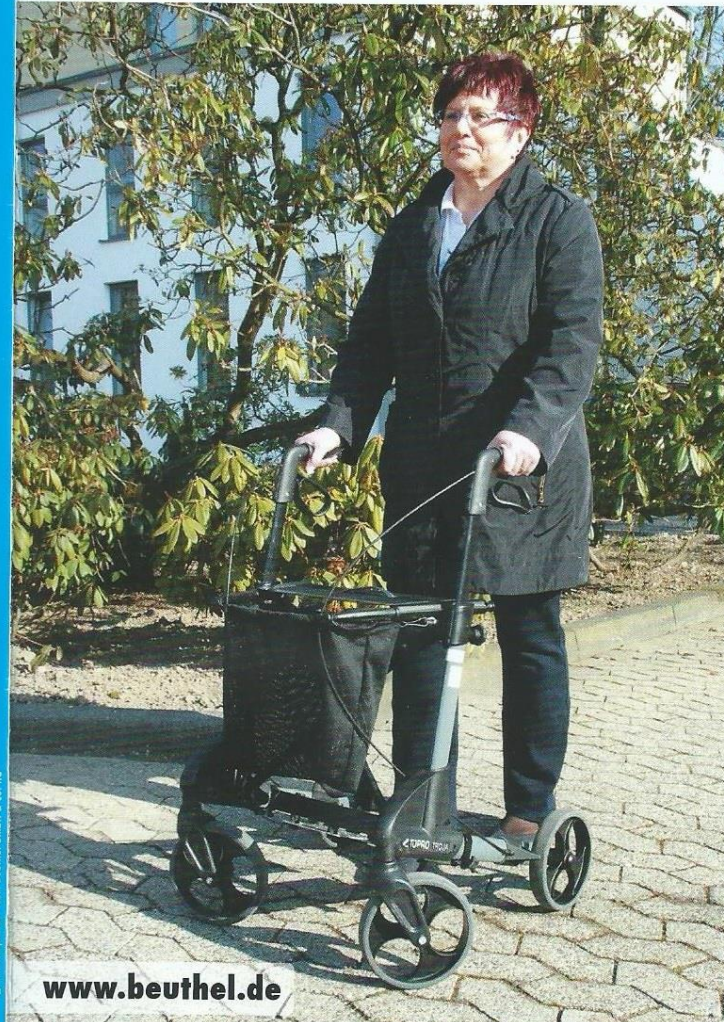


[www.beuthel.de](http://www.beuthel.de)

## AF-Stepper

### Hilfe und Therapie für den Alltag.

Der AF-Stepper ist ein Modul, das sowohl die beim Parkinson spontan auftretende Bewegungsblockade (Freezingphänomen) durchbrechen kann, als auch ein probates Hilfsmittel um das Gangbild zu verbessern.

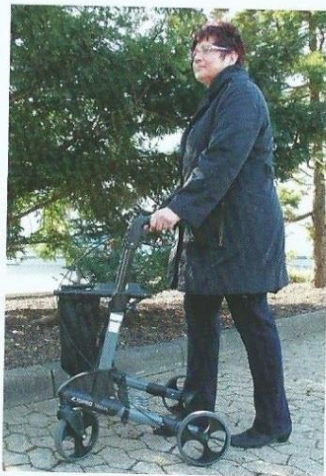

Die anfallartigen Blockaden treten bei Beginn zu zielgerichteten Bewegungen, besonders beim Starten zum Gehen, Richtungswechseln, vermeintlichen Engpässen oder Stress auf.

Äußere Reize, wie zum Beispiel der Fuß einer Begleitperson, der Schlag auf den Oberschenkel, ein Hindernis welches überschritten werden muss sowie das Treppensteigen können das Freezing durchbrechen und den Gang wieder ermöglichen.

Das AF-Stepper-Modul wird einfach zwischen die Längsstreben des Rollators gesteckt (Bild 1) und mit zwei Rändelschrauben (Bild 2) festgeschraubt. Die Paddel können auch in der Schrittlänge verschoben werden (Bild 3 und 4).

Dieses Modul ist mit zwei gummielagerten Aluminiumpaddeln ausgestattet, auf die bei einer Blockade getreten werden kann.

Beim Betreten gibt dieses Paddel nach und schwingt beim Verlassen in seine ursprüngliche Position zurück (Treppensteigegefühl). Das Gehen ist wieder möglich und die Sturzgefahr beseitigt.

### AF-Stepper als Trainingshilfsmittel

Bei vielen Krankheiten ist oft auch eine Verschlechterung des Gangbildes zu beobachten, kleine und kurze Tippelschritte sind oft die Folge.

Hier kann der AF-Stepper als Trainingsgerät eingesetzt werden und durch den bewussten Versuch die Paddel zu betreten, eine Verlängerung der Schritte begünstigen.

### Anbauanleitung



Modul aufstecken und festschrauben



Schraube lösen und Paddel verschieben

### Bedienhinweise



Im Falle einer Blockade auf die Paddel treten.



Die Blockade wird durchbrochen, das Gehen ist wieder möglich!